

7. お渡し時の留意点

- レンズ下部に、遠用度数よりも少し弱めの度数が入っています。そのため、レンズ下部で遠くを見るとぼやけて見えたり、ピントが合わないことがあることをご説明ください。
- 車の運転など、慣れるまでに時間を要することがあることをご説明ください。

8. トライアルレンズ

- ① トライアルレンズを使って見え方を体験いただけます。ニコン リラクシーの特徴を実感いただくためのツールとして活用できます。また、通常の単焦点レンズとの見え方の違いや留意点をご説明いただくために活用できます。(販売予定: 2005年秋)
- ② 遠用度数の検眼レンズの上からご使用ください。
- ③ レンズ下部は遠用度数よりも少し弱めの度数になるため、ぼやけて見えたり、ピントが合わないことがありますので、期待できる効果と合わせてご説明ください。

9. Q&A

Q: ぼやけて見えたり、ピントが合わないことがあるのですが、

A: レンズ下部は、遠用度数よりも少し弱めの度数になります。

そのためレンズ下部で遠くを見るとぼやけて見えたり、ピントが合わないことがあります。

Q: 効果はどのくらいの時間で出るのですか？

A: 個人差があります。効果が出るまでに時間を要することがあります。

Q: すぐに慣れますか？

A: 個人差がありますが、慣れるまでに時間を要することがあります。

Q: レンズ下部に入っている度数は、どのくらい弱い度数なのですか？

A: 度数差は最大で1.00Dです。

Q: 遠視には使えないのですか？

A: 近視の方だけではなく、遠視の方にも同等の効果が期待できます。

販売店舗へ: ただし下方に向かって+1.00D変化する設計のため、下方に向かって度数は強くなるイメージです。

遠視の場合は、遠用度数が安全矯正に近いほど効果が期待できます。